

Table de consultation brancard ELITE - N° TA100

La table de consultation brancard, entièrement en acier inoxydable, matériau hygiénique et durable, s'avère être un véritable atout à toute situation d'une clinique vétérinaire. Très polyvalente, elle est à la fois, une table de consultation, une table élévatrice et un chariot de transport.

Elle permet de protéger l'animal tout comme le personnel car parfaite pour soulever et véhiculer même les patients les plus volumineux, jusqu'à 100 KG, sans manipulation ou mouvement inutile, grâce à sa hauteur variable adaptable aux différents transferts de l'animal tout au long de son parcours médical.


Equipée de roues autoguidées, les déplacements sont facilités. Les freins à chaque roue permettent une position fixe à l'endroit souhaité et protège la table de tout mouvement intempestif.

Dimensions :

- Taille du plateau : 129 x 60 cm
 - Hauteur minimum : 22.5 cm
 - Hauteur maximale : 96.5 cm
 - Charge maximum : 100 KG
- Formats sur mesure possibles*

Options :

- TA 100400 - Table de consultation brancard batterie
TA 100405 - Table de consultation brancard télécommande* et batterie
TA 100410 - Table de consultation brancard radiologie** batterie
TA 100415 - Table de consultation brancard radiologie** télécommande* et batterie

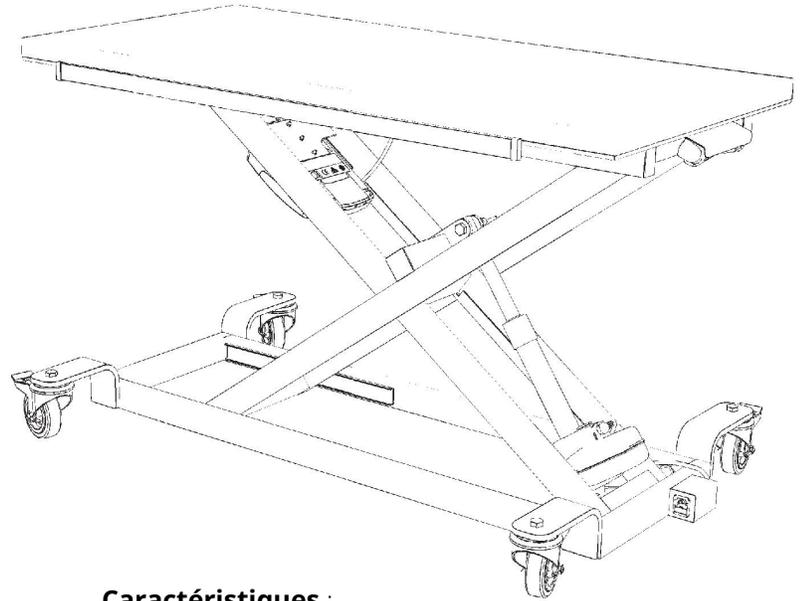

Caractéristiques :

- Commande manuelle à hauteur variable
- Vérin électrique silencieux et sans secousse
- Plateau inox à hauteur variant de 22.5 à 96.5 cm
- Mécanisme en croix pour une stabilité maximum
- Entièrement en acier inoxydable 304 L
- Roulettes mobiles à 360° avec mécanismes de verrouillage - anti trace en caoutchouc naturel - diamètre 125 mm aux normes
- Barre de contention de chaque côté
- Batterie rechargeable intégrée 24 V - longue autonomie - chargeur 204 V
- Système électrique aux normes CE
- Structure inox garantie 5 ans
- Parties électriques garanties 2 ans
- *Pour l'option télécommande - système filaire
- **Pour l'option radiologie - revêtement en polyéthylène spécifique usiné anti-rayure de 16 mm - colori bleu

Table de consultation brancard ELITE - N° TA100

Attention bien lire la notice d'utilisation avant de mettre l'appareil en fonctionnement

Dans un premier temps, n'oubliez pas d'activer votre garantie directement sur notre site internet www.vetinox.fr - rubrique Garantie Produit. Ensuite laissez-vous guider pour l'enregistrement de votre matériel.

• **Installation - Mise en service**

- Déballer le produit avec précaution
- Retirer les cales en mousse
- Brancher la table à une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel
- Attention avant la première utilisation, mettre en charge la batterie pendant 24 H
- Pour lever et descendre la table, actionner la commande manuelle



• **Maintenance - en cas de panne**

- Le matériel est garanti 5 ans contre tout défaut mécanique et corrosion ainsi que 2 ans sur les parties électriques.
- Le vérin est de type moto réducteur 220 Volts – 400 Watts.
- Courant de fonctionnement de la table = 220-240 volts + batterie 24 V

Votre table ne se lève ou ne se baisse plus :

- Vérifier que la batterie soit bien chargée
- Vérifier le disjoncteur sur votre tableau électrique
- Si malgré toutes ces vérifications, votre table ne fonctionne toujours pas, merci de nous contacter, nous prendrons en charge votre demande.

• **Contre-indications**

- Ne pas immerger la table, ou la laver au jet haute pression – risque d'électrocution
- Ne pas dépasser le poids maximum autorisé
- Poids maximum autorisé : 100 KG
- Raccorder l'appareil sur un réseau électrique protégé
- Ne pas modifier la structure de l'appareil, ou le système électrique, de manière générale ne faire aucune modification
- Installer l'appareil dans un local propre et approprié

• **Nettoyage et précaution d'emploi**

L'inox employé est de type 304 L. Cet inox possède une très grande résistance à la corrosion. L'inox étant une matière pleine et non un revêtement de surface, en aucun cas, l'apparition de tâches ou de traces ne peut être liée à de la rouille.

Vous pouvez nettoyer et redonner l'aspect brossé avec un tampon récurant synthétique, type Scotch-Brit vert, en frottant dans le sens du brossé. Ne surtout pas utiliser de la paille de fer. Bannir tous les produits sous forme de crème qui risquent d'encrasser l'inox ou produits à base de javel ou de chlore. Les produits à privilégier sont les produits à vitre ou l'ammonium quaternaire.

En cas de doute, nous envoyer une photo de la composition du produit de nettoyage pour confirmation d'utilisation.



ZAC du Pont des Nautes - 03410 SAINT VICTOR

Tél : 04 70 03 31 31 - Fax : 04 70 03 03 07

E-mail : contact@vetinox.fr

www.vetinox.fr

