


## Table de consultation électrique ELITE - N° TA400

Cette table de consultation est entièrement fabriquée en acier inoxydable, matériau hygiénique et durable.

Grâce à sa commande au pied et sa hauteur réglable par vérin électrique, vous pouvez utiliser la table d'examen en toute facilité, elle vous permet de travailler de façon ergonomique, sans forcer sur votre dos.

D'une grande stabilité grâce à sa structure en croix, cette table vétérinaire assure une montée sans secousse et permet d'examiner en toute sécurité des animaux pesant jusqu'à 100 kg.

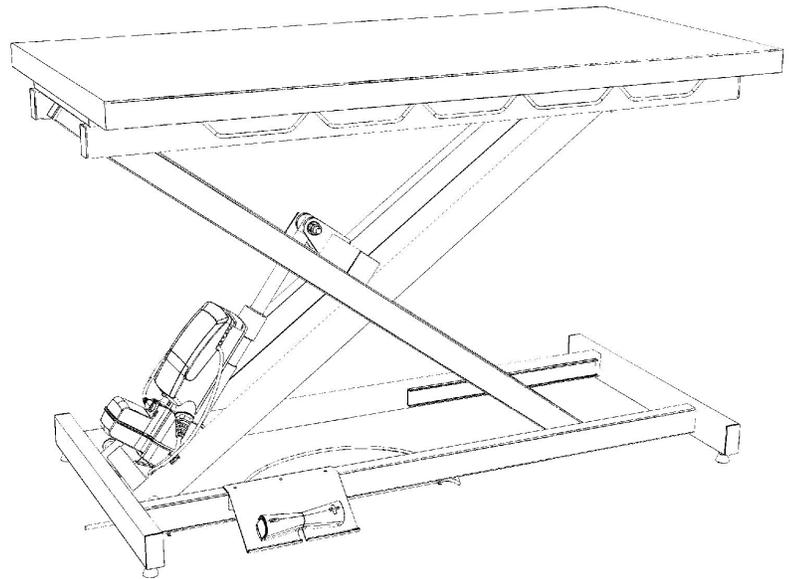

### Caractéristiques :

- Pédale électrique de commande
- Vérin électrique silencieux et sans secousse
- Mécanisme en croix pour une stabilité maximum
- Entièrement en acier inoxydable 304 L
- Plateau inox à hauteur variable de 24 à 98 cm
- Crochets d'attache
- Patins de stabilité
- Système électrique aux normes CE
- Structure inox garantie 5 ans
- Parties électriques garanties 2 ans

### Dimensions :

- Taille du plateau : 125 x 60 cm
  - Hauteur minimum : 23.9 cm
  - Hauteur maximale : 97.7 cm
  - Charge maximum : 100 KG
- Formats sur mesure possibles*

### Options :

- TA 400000 - Table consultation électrique plateau inox  
TA 400010 - Table consultation électrique tapis & cadre



ZAC du Pont des Nautas - 03410 SAINT VICTOR

Tél : 04 70 03 31 31 - Fax : 04 70 03 03 07

E-mail : [contact@vetinox.fr](mailto:contact@vetinox.fr)

[www.vetinox.fr](http://www.vetinox.fr)



## Table de consultation électrique ELITE - N° TA400

*Attention bien lire la notice d'utilisation avant de mettre l'appareil en fonctionnement*

**Dans un premier temps, n'oubliez pas d'activer votre garantie directement sur notre site internet [www.vetinox.fr](http://www.vetinox.fr) - rubrique Garantie Produit. Ensuite laissez-vous guider pour l'enregistrement de votre matériel.**



• **Installation - Mise en service**

- Déballer le produit avec précaution
- Retirer les cales en mousse
- Brancher la table à une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel
- Pour lever la table, appuyer sur la pédale ayant une flèche vers le haut
- Pour descendre la table, appuyer sur la pédale ayant une flèche vers le bas

• **Maintenance - en cas de panne**

- Le matériel est garanti 5 ans contre tout défaut mécanique et corrosion ainsi que 2 ans sur les parties électriques.
- Le vérin est de type moto réducteur 220 Volts – 400 Watts. Il se compose du vérin en lui-même sur lequel est clipsé un transformateur, raccordé à une pédale.
- Courant de fonctionnement de la table = 220-240 volts.

Votre table ne se lève ou ne se baisse plus :

- Vérifier que le câble soit bien branché ou qu'il n'est pas été sectionné
- Vérifier le disjoncteur sur votre tableau électrique
- Si malgré toutes ces vérifications, votre table ne fonctionne toujours pas, merci de nous contacter, nous prendrons en charge votre demande.

• **Contre-indications**

- Ne pas immerger la table, ou la laver au jet haute pression – risque d'électrocution
- Ne pas dépasser le poids maximum autorisé
- Poids maximum autorisé : 100 KG
- Raccorder l'appareil sur réseau électrique protégé
- Ne pas modifier la structure de l'appareil, ou le système électrique, de manière générale ne faire aucune modification
- Installer l'appareil dans un local propre et approprié

• **Nettoyage et précaution d'emploi**

L'inox employé est de type 304 L. Cet inox possède une très grande résistance à la corrosion. L'inox étant une matière pleine et non un revêtement de surface, en aucun cas, l'apparition de tâches ou de traces ne peut être liée à de la rouille.

Vous pouvez nettoyer et redonner l'aspect brossé avec un tampon récurant synthétique, type Scotch-Brit vert, en frottant dans le sens du brossé. Ne surtout pas utiliser de la paille de fer. Bannir tous les produits sous forme de crème qui risquent d'encrasser l'inox ou produits à base de javel ou de chlore. Les produits à privilégier sont les produits à vitre ou l'ammonium quaternaire.

En cas de doute, nous envoyer une photo de la composition du produit de nettoyage pour confirmation d'utilisation.



ZAC du Pont des Nautes - 03410 SAINT VICTOR

Tél : 04 70 03 31 31 - Fax : 04 70 03 03 07

E-mail : [contact@vetinox.fr](mailto:contact@vetinox.fr)

[www.vetinox.fr](http://www.vetinox.fr)

