

FICHE TECHNIQUE

Tables de consultation brancard ELITE TA100 420, TA100 425
- USAGE INTÉRIEUR -

La table de consultation-brancard, entièrement conçue en acier inoxydable – un matériau à la fois hygiénique et résistant – constitue un atout majeur pour toute clinique vétérinaire. Grâce à sa grande polyvalence, elle remplit trois fonctions essentielles : table de consultation, table élévatrice et chariot de transport.

Conçue pour garantir la sécurité de l'animal comme du personnel soignant, elle permet de soulever et déplacer aisément des patients pouvant peser jusqu'à 100 kg, sans effort superflu ni manipulations risquées. Sa hauteur réglable s'adapte à chaque étape du parcours de soin de l'animal, facilitant les transferts en douceur.

Dotée de roues autoguidées, elle se déplace facilement. Chaque roue est équipée d'un frein indépendant, assurant une parfaite stabilité une fois en position, et évitant tout mouvement involontaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande manuelle à hauteur variable
- Vérin électrique silencieux et sans secousse
- Plateau inox à hauteur variant de 22.5 à 96.5 cm
- Mécanisme en croix pour une stabilité maximum
- Entièrement en acier inoxydable 304 L
- Roulettes intérieures mobiles à 360° avec mécanismes de verrouillage :
 - diamètre 125 mm aux normes
- Barre de contention de chaque côté
- Batterie rechargeable intégrée 2.5Ah/15A, 25.2 V DC - longue autonomie
- Système électrique aux normes CE
- Structure inox garantie 5 ans
- Parties électriques garanties 2 ans (batterie 1 an)

DIMENSIONS

- Taille du plateau : 129 x 60 cm
 - Dimension hors tout pour passage de porte : 75 cm
 - Hauteur minimum : 22.5 cm
 - Hauteur maximale : 96.5 cm
 - Charge maximum : 100 kg
- Formats sur mesure possibles

Code	Désignation
TA100 420	Table de consultation brancard ELITE avec batterie (exclusivement réservée pour un usage intérieur)
TA100 425	Table de consultation brancard ELITE télécommande* et batterie (exclusivement réservée pour un usage intérieur)
AC003 007	1 roulette avec frein + vis 6 pans pour fixation Ø125

* Pour l'option télécommande - système filaire



TA100 420



AC003 007

Les roulettes sont conçues exclusivement pour une utilisation en intérieur.

FICHE TECHNIQUE

Tables de consultation brancard ELITE TA100 420, TA100 425

ATTENTION BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN FONCTIONNEMENT

Dans un premier temps, n'oubliez pas d'activer votre garantie directement sur notre site internet www.vetinox.fr / rubrique «Garantie Produit».

Ensuite laissez-vous guider pour l'enregistrement de votre matériel.

INSTALLATION - MISE EN SERVICE

- Déballer le produit avec précaution
- Retirer les cales en mousse
- Brancher la table à une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel
- **ATTENTION** : avant la première utilisation, mettre en charge la batterie pendant 24 H
- Pour lever et descendre la table, actionner la commande manuelle

MAINTENANCE - en cas de panne

- Le matériel est garanti 5 ans contre tout défaut mécanique et corrosion ainsi que 2 ans sur les parties électriques, 1 an sur la batterie.
- Le vérin est de type moto réducteur 24 Volts.
- Courant de fonctionnement de la table = 100-240 V AC + Batterie 25.2 V
- Votre table ne se lève ou ne se baisse plus :
 - Vérifier que la batterie soit bien chargée et que le Bouton du bloc batterie soit bien sur **ON (vert)**.
 - Vérifier le disjoncteur sur votre tableau électrique
 - Si malgré toutes ces vérifications, votre table ne fonctionne toujours pas, merci de nous contacter, nous prendrons en charge votre demande.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas immerger la table, ou la laver au jet haute pression – risque d'électrocution
- Ne pas dépasser le poids maximum autorisé
- Poids maximum autorisé : 100 kg
- Raccorder l'appareil sur un réseau électrique protégé
- Ne pas modifier la structure de l'appareil, ou le système électrique, de manière générale ne faire aucune modification

NETTOYAGE ET PRÉCAUTION D'EMPLOI

L'inox employé est de type 304 L. Cet inox possède une très grande résistance à la corrosion. L'inox étant une matière pleine et non un revêtement desurface, en aucun cas, l'apparition de tâches ou de traces ne peut être liée à de la rouille.

Vous pouvez nettoyer et redonner l'aspect brossé avec un tampon récurant synthétique, type Scotch-Brit vert, en frottant dans le sens du brossé.

Ne surtout pas utiliser de la paille de fer. Bannir tous les produits sous forme de crème qui risquent d'encrasser l'inox ou produits à base de javel ou de chlore. Les produits à privilégier sont les produits à vitre ou l'ammonium quaternaire.

En cas de doute, nous envoyer une photo de la composition du produit de nettoyage pour confirmation d'utilisation.

